

CLEAN

BUSTINE DA 5 g

Disinfettante idrosolubile ad azione battericida, fungicida e virucida. Ideale per la disinfezione ovunque si richiedono accurate e prolungate condizioni igieniche

Presidio Medico Chirurgico – Registrazione Ministero della Salute N. 8320

SCHEMA TECNICA

DESCRIZIONE :

Clean sviluppa cloro attivo in soluzione acquosa. E' perfettamente stabile nel tempo, evitando in tal modo, dopo il trattamento, eventuali ricontaminazioni. Clean non è corrosivo nei confronti dei metalli e delle attrezzature in genere. Una bustina da 5 g disciolta in 1 l di acqua, 1200 ppm di cloro attivo.

APPLICAZIONI :

UTILIZZARE clean ovunque si richiedano accurate e prolungate condizioni igieniche, in particolare ove si necessiti di utilizzare un disinfettante che liberi cloro ma non a base alcalina.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO :

Attività battericida: scegliere una bustina da 5 g di prodotto in 1 litro di acqua (soluzione al 0,5%) irrorare o immergere per almeno 5 minuti e risciacquare con acqua.

Attività fungicida: scegliere una bustina da 5 g di prodotto in 1 litro di acqua (soluzione al 0,5%) irrorare o immergere per almeno 15 minuti e risciacquare con acqua.

Attività virucida: diluire una bustina di CLEAN 5 g secondo la seguente tabella

QUANTITA' ACQUA	CONCENTRAZIONE D'ATTIVO	TEMPO DI CONTATTO MINIMO	EFFICACIA VIRUCIDA
1 LITRO	0,5 %	1 MINUTO	Tutti i virus incapsulati tra cui CO- RONAVIRIDAE (come MERS-CoV 2, SARS-CoV 1, SARS-CoV2), HBV, HCV, HIV, virus EBOLA, ecc.
1,5 LITRO	0,3 %	1 MINUTO	
3 LITRI	0,15 %	5 MINUTI	

OVE NECESSARIO RISCACQUARE CON ACQUA

BIODEGRADABILITA' :

Non contiene sostanze assoggettabili al Reg. 648/2004.

STATO FISICO :

polvere bianca
dal caratteristico
odore.

% CLORO ATTIVO

22,8 - 25,2

pH (sol. 5%) :

8,0 - 10,3



ICF DET S.r.l. 

Via Bellisario 31 - 26020 Palazzo Pignano (CR) - Italia

Tel: +39 0373 1974449 - Fax: +39 0373 1972082

Email: customercare@icf-det.it - Web: www.icf-det.it